


1. 개요

- 품목명 : 절삭가공용치과도재
- 모델명 : Amber Mill H LT C10/W1 외 161건
- 사용목적 : 인레이, 온레이, 전치 싱글크라운, 소구치 싱글크라운의 치과수복물을 제작 하기 위해서 사용하는 치과도재료서, 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조 유닛으로 절삭가공하는 도재이다.
- 포장단위 : 자사 포장단위에 따른다.
- 사용기간 : 제조일로부터 3년
- 제조업자 상호 및 주소 : (주)하스
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14
- 제조업 허가번호 : 제 2814호
- 제품품목 허가번호 : 제인 20-4601호

2. 사용 방법

(1) 사용 전 준비사항

- ① 사용하고자 하는 제품과 동일제품인지 확인한다.
- ② 이물질이 혼입되지 않도록 한다.
- ③ 공기가 잘 통하는 장소에서 사용한다.
- ④ 제조사의 사용설명서를 숙지한 후 사용방법을 준수한다.

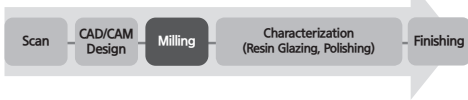

(2) 사용방법 및 조작방법

- ① Jig를 정확한 위치에 부착한다.
- ② CAD/CAM 장비에 장치한다.
- ③ 준비된 Block의 사이즈 정보를 CAD/CAM 장비에 입력한다.
- ④ 가공에 필요한 보정 정보를 입력한다.
- ⑤ CAD/CAM 장비를 사용하여 Block을 가공한다.
- ⑥ 가공이 완료된 블록을 조심스럽게 장비에서 분리한다.
- ⑦ 가공된 인공치아 또는 보철물 등을 블록으로부터 분리한다.
- ⑧ 필요 시 폴리싱 및 레진 글레이징 처리를 실시한다.

(3) 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 사용 후 남은 블록은 폐기한다.
- ② 일회용이며, 사용된 제품은 재사용을 금지한다.

3. 사용시 주의사항

(1) 경고사항

- ① 본 제품의 사용 전에 블록 본체의 파손이나 크랙 여부를 필히 확인한다.
- ② jig 장착 시 정확한 위치에 부착한다.

(2) 금기사항

- ① 유소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- ② 제품이 파손되지 않도록 포장재에 잘 싸서 보관한다.

(3) 주의사항

- ① 본 제품의 탈 · 장착 시에는 CAD/CAM 장비의 절삭공구에 손상을 입지 않도록 주의한다.
- ② 절삭공구에 손등이 끼이지 않도록 주의한다.
- ③ CAD/CAM 장비 가동 시 발생 되는 분진을 억제 또는 제거한다.
- ④ 본 제품은 바닥에 떨어뜨리거나 충격을 주어 파손되지 않도록 한다.

4. 저장방법

- ① 본 제품의 보관은 상온의 건조한 곳에 보관한다.
- ② 제품이 파손되지 않도록 포장재에 잘 싸서 보관한다.
- ③ 본 제품은 온도 0℃~40℃, 습도 10% r.H~90% r.H, 대기압 500 hPa~1060 hPa에서 보관한다.

5. 금기증

- 대구치 크라운
- 브릿지 케이스
- 과도하게 깊은 치은연하 지대치
- 이갈이

- 기타 적응증에 해당하지 않는 케이스

6. 물리적 및 기계적 특성

- ① 굴곡강도(이축강도) : 100 MPa 이상
- ② 흡습수도 : 40 μg/mm³ 이하
- ③ 용해도 : 7.5 μg/mm³ 이하

* 일회용 비멸균 의료기기임. * 재사용 금지임.

* 본 제품에 의문사항이 발생할 경우에는 당사로 연락하여 주시기 바랍니다. (Tel : 02-2083-1365)

7. Pictograph

	Do not reuse		Caution		Catalogue Number
	Consult Instructions For Use		Batch Code		Date of Manufacture
	Do not use if package is damaged		Manufacturer		Authorized Representative in the European Community
	Non Sterile		Rx only		CE Marking
	Keep away from sunlight	CAUTION: US Federal restricts this device prescription only			

KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

CE 2195

(주)하스

제1공장 25452 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14
Tel: 070-7712-1300 / Fax: 033-644-1231
고객센터 : 02-2083-1368
E-mail : hasscorp@hassbio.com
Website : www.hassbio.com

